

Bordereau confrontation MPL23-3

Nombre d'inscrits: 166

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abiopratt.fr.

Munissez-vous de votre identifiant ainsi que du mot de passe

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu Accueil « Mes Confrontations » dès le 28/09/2023.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la date limite : 30/10/2023 à minuit

Mycoplasmes (1 lyophilisat par confrontation)

Echantillon : MPL23-3A

Lyophilisat à conserver au réfrigérateur (2°-8°C).

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Reprise du lyophilisat : **1ml d'eau distillée stérile.**

Volume d'ensemencement d'une gélose A7 : **100µl du lyophilisat reconstitué**

Ensemencement de la galerie : faire une dilution au **1/10ème** du lyophilisat reconstitué.

Cette dilution se substitue à celle indiquée dans le mode opératoire par votre fournisseur

A utiliser dès reprise

MPL23-3A Lyophilisat

Technique

Réactif utilisé *

Gélose A7

Avez vousensemencé une Gélose A7 *

☐ Oui

☐ Non

Si oui Colonies mises en évidence :

☐ Ureaplasma Sp.

☐ Mycoplasma hominis

☐ Ureaplasma Sp. et Mycoplasma Hominis.

☐ Absence de colonies

Commentaires

Commentaires

[Ureaplasma Sp.](#)

Dépistage

Ureaplasma Sp. *

- ☐ Absence
- ☐ Présence
- ☐ Non réalisé

Titre (Les titres sont exprimés en puissance de 10) *

- ☐ inférieur à 10 puissance 3
- ☐ 10 puissance 3
- ☐ inférieur à 10 puissance 4
- ☐ 10 puissance 4
- ☐ Supérieur ou égal à 10 puissance 4
- ☐ 10 puissance 5
- ☐ Supérieur à 10 puissance 5
- ☐ 10 puissance 6
- ☐ Supérieur à 10 puissance 6
- ☐ Non rendu

Test de résistance Ureaplasma Sp.

Technique antibiogramme *

- ☐ ATB NON REALISE
- ☐ A3+A6+U9
- ☐ AUTOBIO
- ☐ BECTON DICKINSON BD MAX
- ☐ BIOLYS
- ☐ BIOMERIEUX
- ☐ BIORAD
- ☐ BYIOSYNEX Mycoplasmatest
- ☐ ELITECH
- ☐ EUROBIO
- ☐ FUMOUEZE
- ☐ STARlet MICROLAB Allplex STI Essential (Eurobio)
- ☐ AUTRE (à préciser en commentaire)

Tétracycline

- ☐ Sensible
- ☐ Résistant
- ☐ Non testé

Clindamycine

- ☐ Sensible
- ☐ Résistant
- ☐ Non testé

Erythromycine

- ☐ Sensible
- ☐ Résistant
- ☐ Non testé

Moxifloxacin

- ☐ Sensible
- ☐ Résistant
- ☐ Non testé

Lévofoxacin

- ☐ Sensible
- ☐ Résistant
- ☐ Non testé

Mycoplasma hominis

Dépistage

Mycoplasma hominis *

- ☐ Absence
- ☐ Présence
- ☐ Non réalisé

Titre (Les titres sont exprimés en puissance de 10) *

- ☐ inférieur à 10 puissance 3
- ☐ 10 puissance 3
- ☐ inférieur à 10 puissance 4
- ☐ 10 puissance 4
- ☐ Supérieur ou égal à 10 puissance 4
- ☐ 10 puissance 5
- ☐ Supérieur à 10 puissance 5
- ☐ 10 puissance 6
- ☐ Supérieur à 10 puissance 6
- ☐ Non rendu

Test de résistance Mycoplasma hominis

Technique antibiogramme Mycoplasma hominis *

- ☐ ATB NON REALISE
- ☐ A3+A6+U9
- ☐ AUTOBIO
- ☐ BECTON DICKINSON BD MAX
- ☐ BIOLYS
- ☐ BIOMERIEUX
- ☐ BIORAD
- ☐ BYIOSYNEX Mycoplasmatest
- ☐ ELITECH
- ☐ EUROBIO
- ☐ FUMOUEZE
- ☐ STARlet MICROLAB Allplex STI Essential (Eurobio)
- ☐ AUTRE (à préciser en commentaire)

Tétracycline

- ☐ Sensible
- ☐ Résistant
- ☐ Non testé

Clindamycine

- ☐ Sensible
- ☐ Résistant
- ☐ Non testé

Erythromycine

- ☐ Sensible
- ☐ Résistant
- ☐ Non testé

Moxifloxacin

- ☐ Sensible
- ☐ Résistant
- ☐ Non testé

Lévofoxacin

- ☐ Sensible
- ☐ Résistant
- ☐ Non testé